

ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel
Bandagen / Fuss-Stützen
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01
www.orthopädie-ammon.ch

Kniebandage zur Entlastung der Kniescheibe



Schmerzen in der Kniescheibe können viele Ursachen haben: Verletzungen, Reizungen durch Überlastung oder Operationen, leichte Arthrose, Arthritis oder leichte Instabilitäten. Die Genumedi Kniebandage kann diese Beschwerden effektiv lindern. Das Geheimnis liegt in der weichen Patella-Silikonpelotte, welche die Kniescheibe sanft massiert und den Druck auf die Kniescheibe beim Bewegen lindert. Die Bandage selbst ist aus festem, kompressiven Gestrick gefertigt. Dadurch werden Schmerzen im Knie effektiv gelindert.

Wirkungsweise

Die integrierte Silikon einlage der Genumedi entlastet die Kniescheibe und bewirkt in Verbindung mit der Kompression des Gestricks einen Massageeffekt. Dieser fördert die Durchblutung des Gelenks und damit den Abbau von Schwellungen und Ergüssen. Reizungen und Schmerzen werden gelindert. Gleichzeitig wird die muskuläre Steuerung und körpereigene Stabilisierung des Kniegelenks verbessert. Die größte Wirkung erzielen Bandagen während der körperlichen Aktivität.


Anziehanleitung

Fassen Sie die Bandage mit den Daumen innen am oberen Ende der seitlichen Noppenhaftbänder. Ziehen Sie die Bandage so über das Knie, dass der Silikonring die Kniescheibe zentral und druckfrei umfasst. Zum Ausziehen greifen Sie die Bandage an den unteren Seitenstäben und ziehen sie nach unten weg. Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von geschultem Fachpersonal erfolgen sollte.

Trage- /Anwendungshinweise

Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl sowie der Maßgabe erfolgen, dass das Knie im Sitzen nicht über 70° angewinkelt wird. Bei längeren Ruhepausen (z.B. langes Sitzen/Autofahrten, Schlafen) sollte die Bandage abgelegt werden. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, so legen Sie das Produkt bitte umgehend ab und kontaktieren Ihren Arzt oder versorgendes Fachgeschäft.

Die Bandage ist auch zum Gebrauch im Wasser geeignet. Bitte spülen Sie das Produkt anschließend gründlich aus.

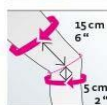

Maßanfertigung
möglich

Oberschenkel-Umfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 51
Unterschenkel-Umfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 41
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.102.Δ01	K.102.Δ02	K.102.Δ03	K.102.Δ04	K.102.Δ05	K.102.Δ06	K.102.

Δ = Farbe ergänzen: 2 = silber, 8 = sand

[Im Shop einkaufen?](#)